

TVÄTTRÅD - Tarpaulin

Tvätttråd för sjukvårdsväskor i presenning (Tarpaulin) material, som har blivit kontaminerade med blod eller annan vätska och som måste dekontamineras:

- Tvätta med vatten och 4% neutral tvål.
- Applicera tvållösningen på en trasa och torka av sjukvårdsväskan för att ta bort smuts.
- Torka den torr med en pappershandduk eller en ren trasa.
- Om ytterligare desinfektion behövs kan du applicera textil- eller textilvänligt desinfektionsmedel.