


# BRUKARINFORMATION - CARL-OSKAR

## Svenska


- Läs alla varningar och instruktioner noggrant innan du använder rollatorn.
- Säkerställ att rollatorn är ordentligt uppfälld innan användning.
- Rollatorn får endast användas som gång- och sittstöd.
- Det är förbjudet att stå på rollatorn.
- Använd inte produkten i trappor eller rulltrappor.
- Iakttag extra försiktighet när rollatorn används i backar eller på ojämnt underlag.
- Sitt aldrig på rollatorn och rulla dig fram med fötterna.
- Fördela vikten jämnt för att förhindra att rollatorn välter när du sätter dig.
- Parkeringsbromsen skall vara ilagd om rollatorn används som stöd när du sätter dig ned eller reser dig upp.
- Placera inget på den hopfällda rollatorn vid förvaring eller transport då det kan skada rollatorn.
- Förvara inte rollatorn nära en värmekälla då detta kan skada vissa detaljer.
- Var försiktig vid hantering av rollatorn så att du inte skadar dig när den har varit utsatt för extremt höga eller låga temperaturer.
- Förvara inte rollatorn utomhus.
- Spara bruksanvisningen för framtida användning.

### Utfällning


1. För handtagen utåt.

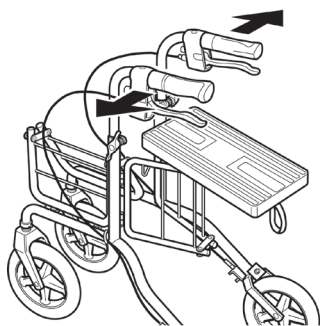

2. Tryck sitsen framåt.

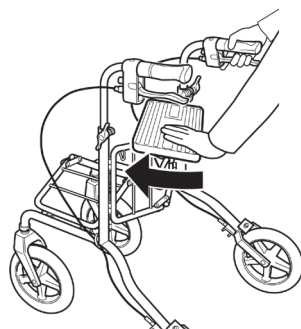


3. Viktigt! Kontrollera att låset greppar om grinden.

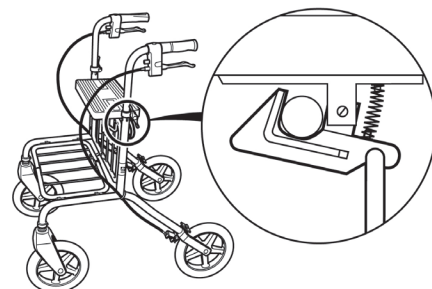


### Hopfällning

1. Dra i den röda öglan så att låset frigör grinden.

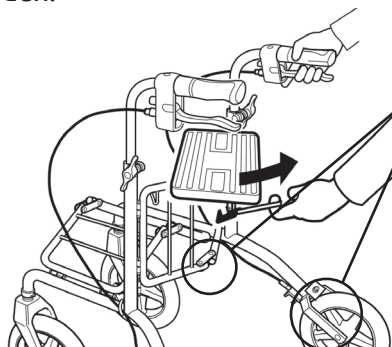


Risk för klämda fingrar

2. Dra sitsen bakåt och för handtagen inåt.

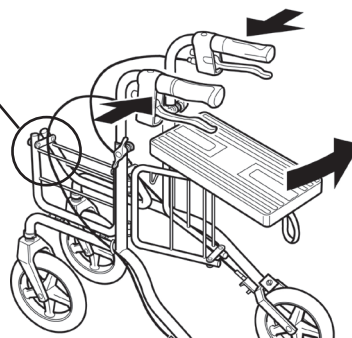


## Justering av körhandtag

Lossa vingvreden och justera körhandtagen till handledshöjd. Lås vingvreden.

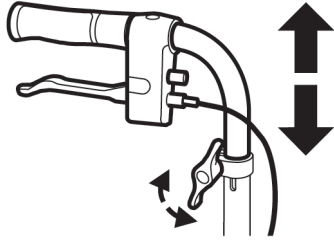

Vid förstärkt modell måste även höjden på förstärkningsstagen justeras.

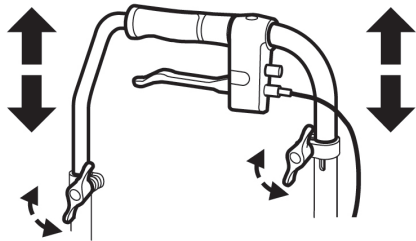

## Parkeringsbroms

Tryck bromshandtaget neråt för parkeringsläge.

**Varning!** Parkeringsbromsa innan Du sätter dig.

## Färdbroms


Drag bromshandtaget uppåt för färdbroms.

**OBS!** Kontinuerlig bromsning leder till onormalt slitage på hjul och broms.

## Bromsjustering





Lossa låsmuttern, justera bromsen genom att skruva på justerhylsan. Efter justering skruva åt låsmuttern.

**Viktigt!** Handtagen får inte höjas över markeringen "0" på handtagsrörens sidor. Körhandtagen ska vara riktade bakåt. Handtagsrörets markering ska vara i linje med streck på klamma på rörets sidor.

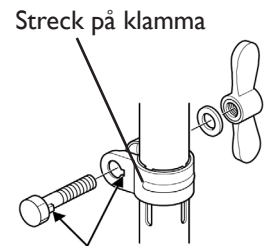

**Varning!** Handtagen får ej vinklas utåt eftersom rollatorns tipprisk då ökar. Vinkeln mellan handtagens longitudinella linje och rollatorns framåtriktning måste alltid vara 180°.

Vid montering av vingvreden är det viktigt att klacken på skruven hamnar i spåret i skruvhålet.

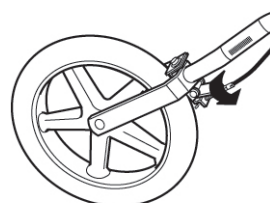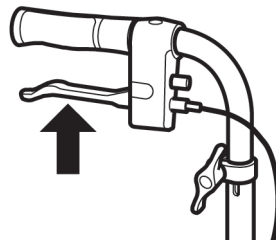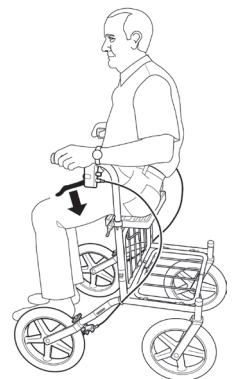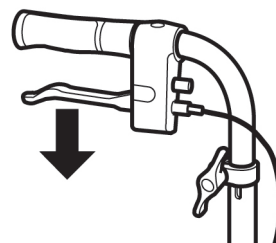

## **Rengöring och service**

Viktigt!

Vid byte av delar på rollatorn ska endast originaldelar användas för att CE-märkningen ska gälla.

Viktigt!

Egna ingrepp/ändringar på rollatorn är inte tillåtet.

Viktigt!

Utför regelbunden översyn av rollatorn för att den ska fungera tryggt och säkert för brukaren.

Översyn bör genomföras regelbundet enligt rekonditioneringsanvisning:

Carl-Oskar, art. nr.: 99211

Rebel, art. nr.: 99212.

Kontakta MediStore AB - för mer information

E-post: [info@medistore.se](mailto:info@medistore.se)

Telefon: 08-406 06 60

